


Żel dopochwowy Prefert® wspomagający poczęcie dziecka

Żel dopochwowy Prefert® jest lubrykantem wspomagającym ruchliwość plemników. Jest dostępny bez recepty w każdej aptece, sklepie specjalistycznym lub w Internecie.

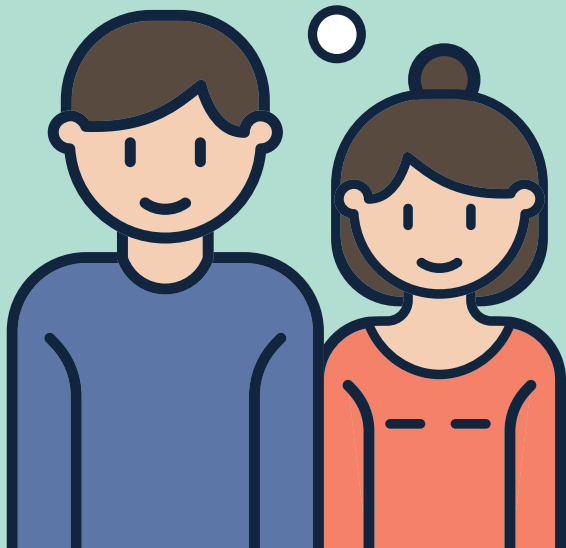

Składniki:

Woda oczyszczona, chlorek sodu, fosforan sodu, fosforan potasu, arabinogalaktan, hydroksyetyloceluloza, poliheksanid

Nie zawiera parabenów, silikonów ani składników pochodzenia zwierzęcego. Produkt wegański.

Zawartość:

- 8 jednorazowych aplikatorów po 4 ml

Wystarcza na 4 – 8 cykli owulacji

Po użyciu:

Wyrzucić aplikator do odpadów domowych.



Wyrób medyczny
Made in Germany

Producent:

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Niemcy

Importer i wyłączny dystrybuor w Polsce:

AMED S.K.A.
Kokanin 84B
62-817 Żelazków
Tel.: +48 883949494

www.sklep.naturalnaplodnosc.pl

02.03.2023



Prefert®

Żel dopochwowy
wspomagający poczęcie
dziecka

Medintim

Prefert®

Vaginal Gel


Wspomaga ruchliwość plemników

Jednej na siedem par, które chcą mieć dziecko, nie udaje się od razu zająć w upragnioną ciążę. Przyczyn może być wiele: stres, zbyt duże oczekiwania lub przyczyny fizyczne, takie jak zbyt kwaśne środowisko pochwy lub zbyt mała liczba plemników zdolnych do zapłodnienia.

Wyjątkowość żelu dopochwowego Prefert® polega na tym, że tworzy on idealne środowisko dla plemników: Poprawia żywotność i ruchliwość plemników w pochwie. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo, że komórka jajowa zostanie zapłodniona.

Wiele par wywiera na siebie presję i uprawia seks według zegara. Współżycie zawsze dokładnie w momencie owulacji może być również stresujące. Może to również prowadzić do suchości pochwy, co może powodować ból podczas stosunku.

Żel dopochwowy Prefert® czyni seks łatwiejszym i przyjemniejszym. Zwykłe, rozpuszczalne w wodzie lubrykanty mają negatywny wpływ na plemniki ze względu na niską wartość pH (=kwaśną wartość pH). Takie lubrykanty zmniejszają płodność i zmieniają lepkość wydzieliny pochwy.

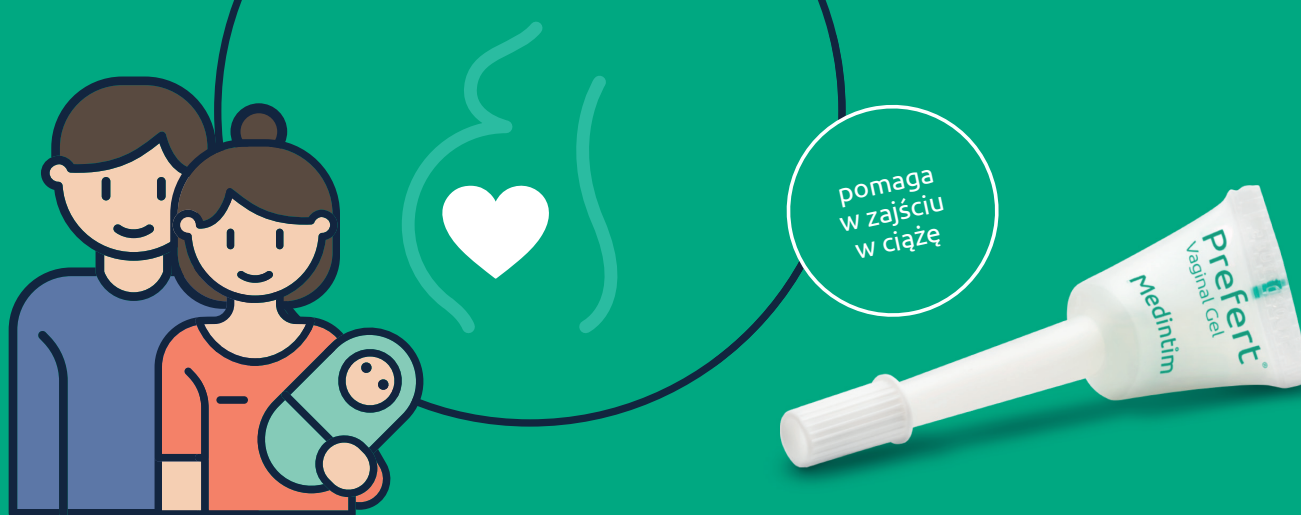

Żel dopochwowy Prefert® tworzy optymalne środowisko do zapłodnienia.

Żel dopochwowy Prefert® tworzy w pochwie wartość pH pomiędzy 7,0 a 7,4, która jest idealna dla zapłodnienia. Sprzyja zapłodnieniu komórki jajowej.

Sposób użycia:

Żel dopochwowy Prefert® wprowadza się przed stosunkiem płciowym bezpośrednio do pochwy za pomocą aplikatora. Lubrykant zapewnia idealną wilgotność i środowisko dla plemników. Poprawia nawilżenie i dzięki temu można czerpać przyjemność z seksu nawet w stresie.

Porada: Można samemu stwierdzić, czy w czasie owulacji pH pochwy jest zbyt kwaśne. W tym celu należy kupić testy pH (w aptece) i za ich pomocą zmierzyć wartość pH w czasie owulacji. Jeśli wartość wynosi 5,0 lub mniej, środowisko jest zbyt kwaśne, aby zająć w ciążę.



Żel dopochwowy Prefert® jest optymalny dla plemników dzięki dostosowanej wartości pH pomiędzy 7,0 a 7,4. Jest to naturalna wartość pH pochwy podczas dni płodnych. W pozostałych dniach cyklu wartość pH jest niższa. Właściwości osmotyczne żelu dopochwowego Prefert® pomagają plemnikom łatwiej dotrzeć do szyjki macicy.

Inne właściwości:

- nie zawiera silikonów i parabenów
- bezwonny i bezbarwny
- bez smaku
- nie plami
- rozpuszczalny w wodzie
- wegański

Substancja czynna:

Bioaktywny arabinogalaktan działa przeciwutleniająco i wspomaga ruchliwość plemników.

Uwaga:

W przypadku infekcji lub urazu pochwy nie należy stosować produktu. Po zabiegach chirurgicznych należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem żelu dopochwowego Prefert®.